


# Schärfe im Griff

**BAYHA® Skalpelle**  
mit auswechselbaren  
Klingen



## BAYHA® Klingenformen

- Klingen aus Kohlenstoffstahl, einzeln verpackt
- 1 Verpackungseinheit (VE) = 144 Stk. (12 Dtzd.)
- sterile Klingen in medizinischer Spezialfolie
- unsterile Klingen in Papierfolie

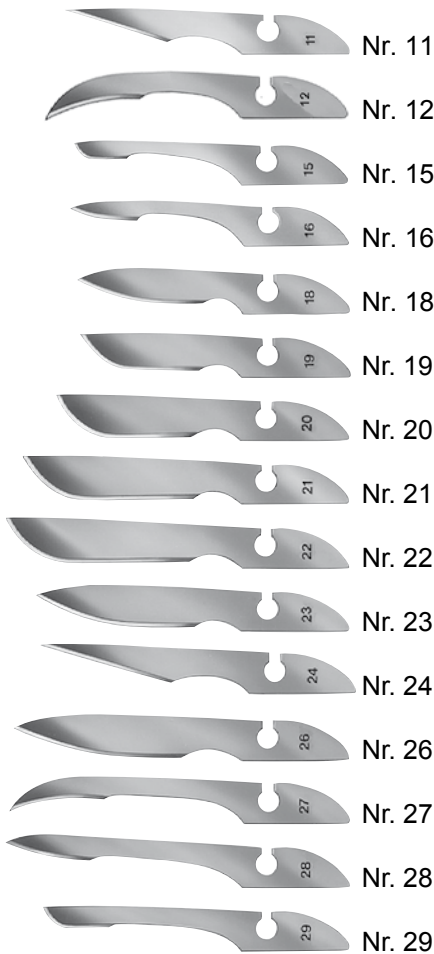

## BAYHA® Sicherheitsklingen




\*nur in unsteriler Ausführung lieferbar

## Vorteile:

- alle Klingenformen passen in jeden BAYHA-Griff
- bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- seitliche Einführung der Klinge in den Griff
- Sicher in der Handhabung


### Ideal – das bewährte BAYHA-Riegelsystem

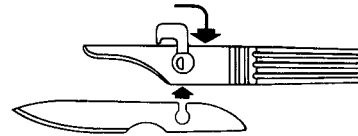

1. Riegel nach oben stellen, Klinge ist lose.
2. Klinge in Pfeilrichtung einsetzen.
3. Riegel in Pfeilrichtung schließen, Klinge sitzt fest.

## BAYHA® Griffe

- aus Edelstahl, rostfrei
- passend für alle Klingenformen

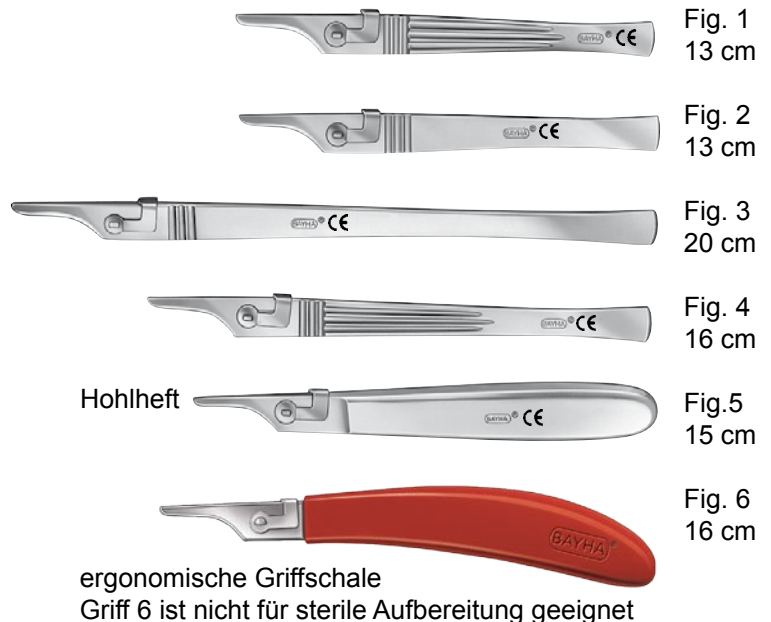

ergonomische Griffschale  
Griff 6 ist nicht für sterile Aufbereitung geeignet

## BAYHA® Schutzkappe

- passend für alle BAYHA-Skalpellgriffe



nicht für sterile Aufbereitung geeignet

**C. Bruno Bayha GmbH**  
Dr. Karl-Storz-Straße 14  
D-78532 Tuttlingen  
Tel. +49 (0)7461/8711  
Fax +49 (0)7461/4944  
Mail: [info@bayha-skalpelle.de](mailto:info@bayha-skalpelle.de)  
Internet: [www.bayha-skalpelle.de](http://www.bayha-skalpelle.de)

